



minitube

· CN · DE · EN · ES · RU

Minitube International

搜索

运输方式

关于我们

产品与服务

新闻

活动

图书馆

联系:

Minitube 米尼图国际

+1 800 582 7047 (免费电话)

minitube@minitube-international.com

新闻



08.04.2013

### Minitub Ibérica presents in FIMA GANADERA (FIGAN) 2013: AndroVision and Extender Station

Zaragoza, March 22, 2013. The livestock sector confirms its full confidence and support to FIGAN. During four days, professionals and companies have demonstrated that Fima Ganadera is a reference in the international market. FIGAN has established itself as the window of innovation and the best platform to present it.

[浏览更多...](#)



11.03.2013


### Founding of World Fish Reproduction Center

Home / Minitube 国际: 动物繁殖技术专家

## Minitube 国际: 动物繁殖技术专家

欢迎访问我们的主页, Minitube 公司是全球领先的农场动物繁殖科技系统供应商。公司专注于人工受精, 胚胎移植及相关生物技术。

在 Minitube, 兽医、工程师及研究人员精诚合作, 不断开发动物培育科技并提供咨询方案, 使我们的客户获得可观的经济效益。

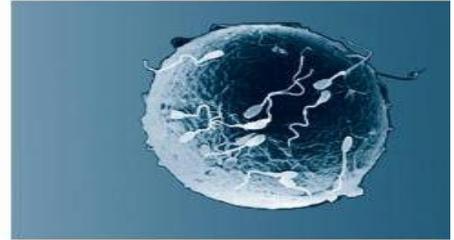

### ANDROVISION™

### 新产品!



- ▶ 拥有内置的精子功能分析
- ▶ 拥有比CASA精子分析更多的功能
- ▶ 了解更多, 请点击进入!

### HYPACKER

### 新产品!



- ▶ 高速度
- ▶ 高科技
- ▶ 高卫生标准设计
- ▶ 了解更多, 请点击进入!

### Minitube - 动物生殖技术 猪 - 2012



Minitube\_Catálogo Reproduction Technology Porcine\_CN\_2012.pdf (5.38 MB)

下载次数: 911



### SpermNotes 猪 2012

内容:

- 为什么在采精和实验时保持均衡温度如此重要?
- 精液采集和稀释时的温度管理
- 精液生产中的温度管理: 缓慢的运动方式是更好的运动方式
- 在非+17°C的条件下可以进行公猪精液生产吗?
- 挑战: 在过高或过低的环境温度下运输精液

## 西德 Mintiub(最先進的人工授精專業公司)

1. 成立於1970年路德維希博士Simmet 總部設在德國蒂芬巴赫
2. Minitüb是一項開拓性的的生殖技術公司, 它已經從一個小的開發商和供應商, 成爲優質量人工授精產品的全球市場領導者,
3. 設備技術涵蓋生殖技術的體外受精, 胚胎移植, 人工授精等。
4. 現在有世界各地的客戶和訓練有素的當地代表, 子公司和分銷商的密切合作。


# 傑達國際實業有限公司

- 1.傑達分公司代理了該公司三個地區的銷售
- 2.傑達臺灣,傑達菲律賓,傑達越南
- 3.傑達集團合併總銷售躍昇全球排名第一名，已成他們重要合作伙伴



## 西德 Mintiub 所生產稀釋粉

- 1.在貯存的整個期間內保持精子細胞的受精能力
- 2.保持精子細胞的活動力和精子膜與精子頂體的功能
- 3.保證精子在最終使用期限時仍能達到高品質
- 4.生產高標準以及密集的週期性品質檢測
- 5.生產中心獲得了標準嚴苛的**GMP**驗證證書
- 6.出廠前嚴格檢測標準的稀釋劑才能被放行並得到品質證書

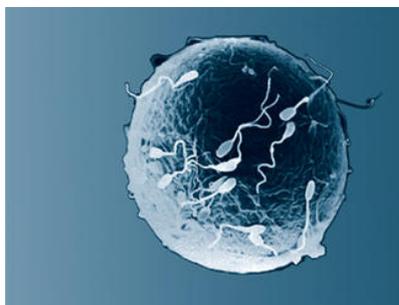

# Merk III 莫克稀釋液



1. Merk III 莫克儲存理想的時間保持質量多達4天
2. 莫克在前48個小時期間是優化之受孕率
3. 應用時 Merk III 必需被溶於蒸餾水,溫度+30 ~+35為優
4. 粉狀將幾分鐘內被溶解,若要加速時,緩慢地搖晃之
5. 在15到20分鐘的適應時期pH值穩定後,可以開始使用
6. 莫克粉必須被儲存低於+10~18'C,在乾燥和陰暗室內
7. 已沖泡後之粉+水應於5'C 冰箱 2~3日內用完
8. 零售 NTD 112 (1000cc水含粉每瓶)
9. 另有5公升裝供人工授精站選用

# Androhep 安卓精液稀釋粉



1. 安卓儲存理想的時間保持質量多達 9 天
2. 使用沖泡方法同莫克
3. Androhep 的精液保存高達 9天,方便使用和運輸
4. Androhep 包含BSA和精心挑選的分子,
5. 保持精細胞膜的功能和反應,保護精子細胞氧化自由基
6. 零售 NTD 321 (1000cc份不含蒸餾水)

# BTS 稀釋液



1. **BTS** 儲存理想的時間保持質量達 3天
2. 使用沖泡方法同莫克
3. **BTS** 為商業化肉豬生產者最佳搭配,
4. 因為價錢較低,又不儲存運送
5. 隨泡隨用,不影響受胎率

傑達公司所代理的西德人工授器材 **Minitub** ，  
傑達集團合併總銷售躍昇全球排名第一名，  
已成他們重要合作伙伴，現在開始了網頁中文化，  
我們將陸續轉載文獻及新產品及新知文稿，  
請進去參觀採購，有項目需要報價時，請記得抄下編號告訴  
我們，其聯結網址如下：

[http://www.minitube.de/CN\\_chi](http://www.minitube.de/CN_chi)

**Minitub** 人工授精及冷凍精液設備器材開發與生產，普及涵蓋牛馬羊豬雞狗及各種小動物

提供牛馬羊豬鹿狗及家禽等  
人工授精,冷凍精液器材及設備



傑達國際實業有限公司  
**Facebook** 官網

<https://www.facebook.com/jeidataiwan>

請幫我們轉載分享及  
參加我們粉絲團 **fans**

(在本網頁最右上方處按讚加入粉絲會員)



# 傑達國際實業有限公司 線上購物網

<http://www.jeida.com.tw/>



傑達公司啓動新的銷售及服務管道專線：  
智慧型手機請輸入這支電話號碼：

**0932-540-256**

訂購，洽詢，聯係，通知，特價，新知，溝通...盡在滑指間